

SALTIPIPAN

Bruksanvisning:

Man håller öppningen i munnen och andas in **på vanligt sätt**, utandningen sker genom näsan. För kraftfull andning är till ingen nytta och bör undvikas.

Den normala användningstiden av Saltpipan är 15-20 minuter/dygn, men behandlingstiden kan förlängas upp till 1-2 timmar/dygn. Det bästa resultatet nås genom regelbundet dagligt bruk av Saltpipan. De första dagarna rekommenderar vi varsam inandning, eftersom det frigörs mera salt i början, och innan man har vant sig kan det kännas obehagligt vid inandningen.

Rengöring: Med en fuktig trasa på utsidan; det får inte komma in vatten i redskapet.

Det finns en färgprick på sidan av pipan för att varje familjemedlem skall kunna känna igen sin egen pipa efter färgen.

Gummistycket ovanpå pipan är en ventil. Den får inte avlägsnas, man får inte heller täppa till den med fingret.

Biverkningar:

Efter att reningsprocessen har startat, avlägsnas gamla orenigheter ur lungorna med hosta och rinnande näsa. Blodtrycket kan tillfälligt stiga upp en aning i samband med början av behandlingen.

Observera:

Om du lider av högt blodtryck eller om du är överkänslig eller multiallergisk är det bäst att diskutera med läkaren innan du börjar med behandlingen.

Vi rekommenderar inte reducering av ordinär medicinering.

Mera information på vår website: www.suolapiippu.com